


START

INSTELLINGEN > BEDIENING

1 Heb je één of twee contacten die je willekeurig kan bedienen? 

- Via kabel? Vibe 10, Vibe 12+ & Tellus (i)6: 2 poorten
- Draadloos? Connectiviteit Jabbla-spraakcomputers: Bluetooth & Wifi

2 Bepaal volgens welk stappatroon het ME5-document doorlopen zal worden.

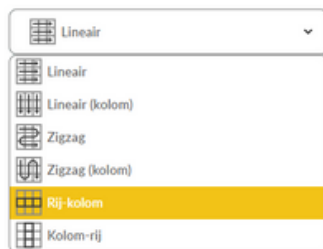

3 Heeft het document een specifieke opbouw?


- Verdeel het document in zelfgekozen scangroepen; zie volgende pagina.
- Of laat ME het document verdelen in vaste scanblokken; zie volgende pagina

START

INSTELLINGEN > BEDIENING

3 Heeft het document een specifieke opbouw?

- **Verdeel het document in zelfgekozen scangroepen**

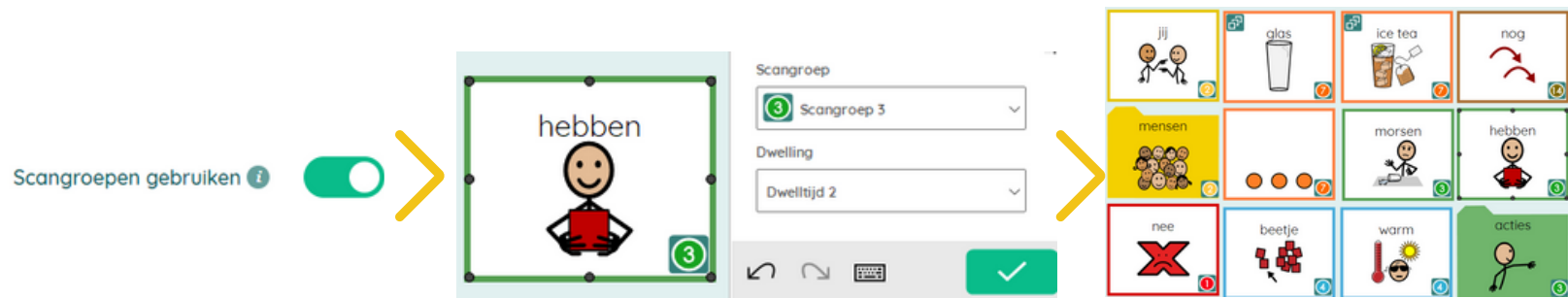

- Of laat ME het document verdelen in vaste scanblokken

Met deze optie wordt een pagina vooraf verdeeld in een aantal blokken. Bij het scannen zullen eerst deze blokken lineair worden doorlopen en daarna wordt het ingestelde scanpatroon (bijvoorbeeld Rijkolom) uitgevoerd binnen het geselecteerde blok.

Prescan in blokken

☒ Ja

START

INSTELLINGEN > BEDIENING

4 Heb je één of twee (zie volgende pagina) contacten die je willekeurig kan bedienen?

1

ME stapt

Optie 1

Automatisch



ME selecteert,

Als je op schakelaar 1 drukt



ME stapt

Optie 2

Als je op schakelaar 1 drukt



ME selecteert, wanneer de scanning voldoende lang halt houdt in een vakje.

Automatisch (na auto-selectietijd)



ME stapt

Optie 3

Als je op schakelaar 1 drukt



ME selecteert, wanneer we

Schakelaar 1 ingedrukt houden



ME stapt

Optie 4

Zolang je schakelaar 1 ingedrukt houdt



ME selecteert,

Wanneer je schakelaar 1 loslaat



START

INSTELLINGEN > BEDIENING

5 Heb je één (zie vorige pagina) of twee contacten die je willekeurig kan bedienen?

1

2

ME stapt

Als je op schakelaar 1 drukt



ME selecteert

Als je op schakelaar 2 drukt



ME stapt

Zolang je schakelaar 1 ingedrukt houdt



ME selecteert


Als je op schakelaar 2 drukt




6

Wil je visuele feedback tijdens het stappen?

- Laat de rij, kolom, blok, groep of het woord markeren tijdens het stappen.

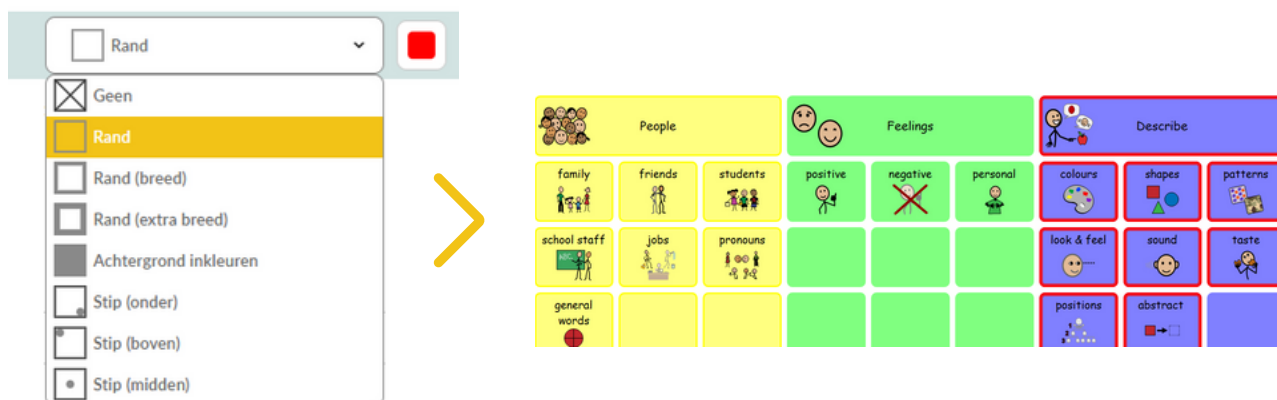

- Vergroot het vak, waarover ME op dat moment stapt.

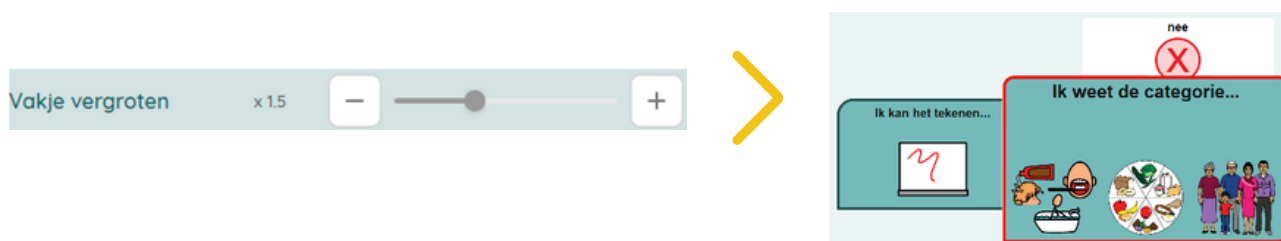

7

Wil je auditieve feedback tijdens het stappen (bv. ondersteuning visus)?

- Laat de rij, kolom, blok, groep of het woord verklanken tijdens het stappen.
 - Gebruik hiervoor zelf opgegeven scanwoorden (in het rechter bewerkenpaneel) of laat ME de labels verklanken.
 - Kies een andere stem voor deze feedback, dan voor de effectieve verklanking van de boodschap.
 - Kies er eventueel voor om de auditieve feedback via een andere output te horen, dan de boodschap zelf.*

AUDITIEVE FEEDBACK

*VIA DE WHISPER



Wat?

Een kleine luidspreker met kabel

Doel?

- Richt de auditieve feedback tijdens het scannen discreet tot de O.C.-gebruiker.
- De overige output (stem, muziek, andere multimedia ...) loopt via de eigenlijke luidspreker van de spraakcomputer.

Connectie met spraakcomputer?

- **Vibe 12**: langere jack van 3,5 mm
- **Tellus (i)5, Tellus (i)6, Vibe 10, vibe 12+**: standaard jack van 3,5 mm
- **Vibe Classic**: niet compatibel!



AUDITIEVE FEEDBACK VIA DE WHISPER

Hoe?


Hardware

De jack van je Whisper in de hoofdtelefoonaansluiting van je spraakcomputer inpluggen



Binnen Mind Express 5

- > In het gewenste profiel
- > Menu > Instellingen > Bediening > Scanning
- + Auditieve feedback
- + Kanaal: Hoofdtelefoon

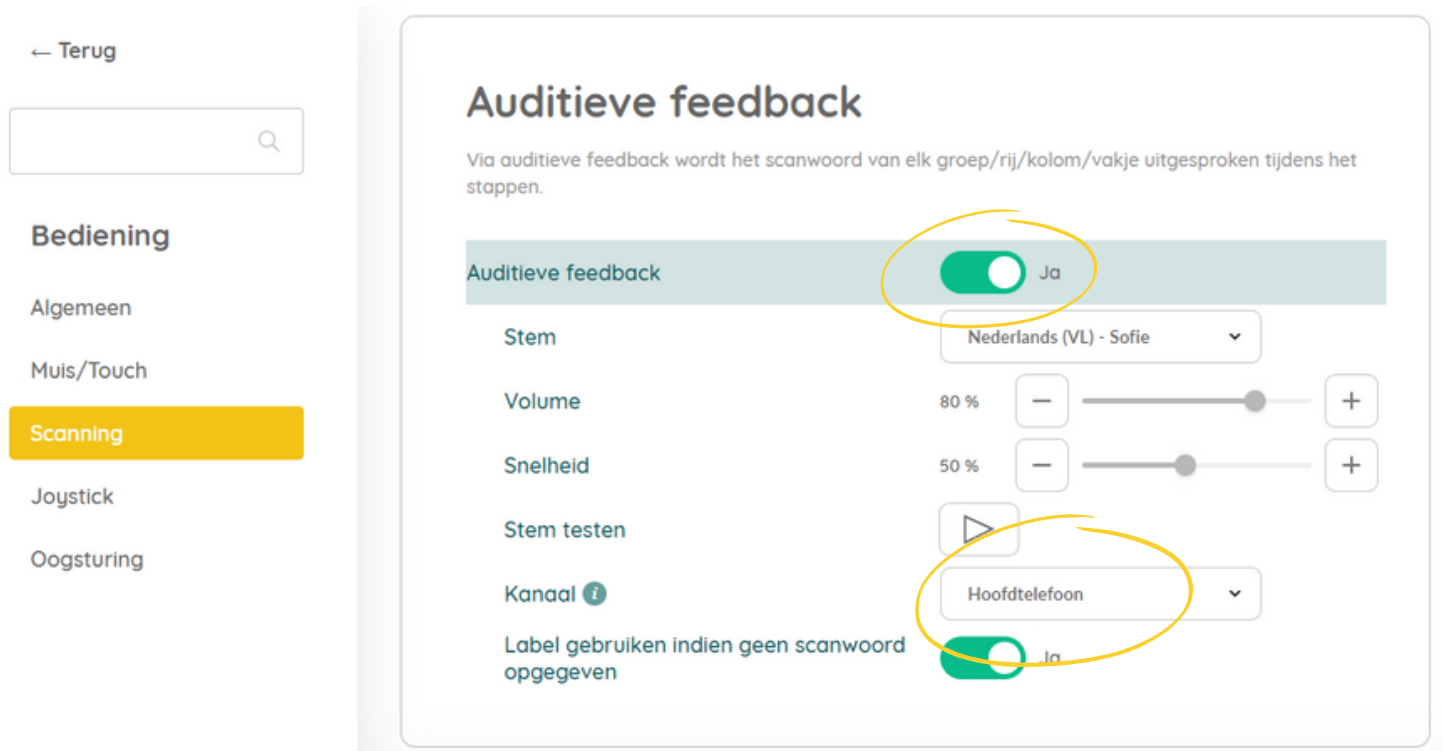

VRAGEN?



Vragen i.v.m. je toestel of software

FAQ

support@jabbla.com of 09 331 58 58



Herstelling van je toestel

repair@jabbla.com of 09 331 58 58



Administratie, facturatie, licentie,...

sales@jabbla.com of 09 331 58 58



Opleiding, vragen rond je bestand,...

logo@jabbla.com of 09 331 58 58